

smartX[®] invasive Blutdruckmessung...
...jetzt kabellos!



INVASIVE DRUCKMESSUNG

smartX® kabelloses Blutdruckmessgerät



Die Verbindung der Empfangseinheit via Bluetooth macht Kabel überflüssig

Sender für 2 oder 4 Druckwandler erhältlich



Wiederaufladbare Batterien ermöglichen kontinuierlichen Betrieb



Mit LogiCal® Einwegartikeln kompatibel



Vierfacher Sender mit 3 Einwegsystemen

Mehr Vorteile dank kabelloser Technologie

smartX® ist ein innovatives kabelloses System für die invasive Blutdruckmessung from Medex®. Dank der modernsten Bluetooth™ Technologie bietet smartX® eine patente und flexible Lösung zur Patientenüberwachung.

smartX® ist die kabellose Datenübertragungseinheit mit Bluetoothfunktion. Die bewährte Technologie des LogiCal® Druckwandlers und die dazugehörigen Einmalsysteme können einfach adaptiert werden. smartX® ist ideal zur Verwendung im OP-Bereich sowie zum Transport von

Patienten. Die Übertragungreichweite beträgt je nach Umgebung ca. 10 m. Auf der Intensivstation kann smartX® die Lösung für schwierige Platzverhältnisse sein.

Einfach

smartX® ist ein einfach per Knopfdruck bedienbares System mit einer leicht verständlichen Bildschirmanzeige. Das System ermöglicht die manuelle Zuordnung von Sender- und Empfängereinheiten. Dies gewährleistet optimale Flexibilität. Die Sendereinheiten sind für 2 oder 4 Druckwandler verfügbar.

Entwirrende Drucküberwachung


Die neue kabellose Technologie reduziert Probleme, die durch Kabel auftreten, z.B. eine unbeabsichtigte Trennung vom Monitor, Korrosion der Kabelstecker, Bruch, Knickung und Verwicklung von Kabeln.

Weniger Kabel – mehr Freiheit

Dank des smartX® Multifunktionsmodus können die Vitalparameter eines Patienten auf zwei Monitoren gleichzeitig angezeigt werden. Dies macht eine kontinuierliche Überwachung des Patienten beim Standort- und Monitorwechsel möglich. Mit dem smartX® Akku kann das System mindestens 24 Stunden betrieben werden, bevor es erneut aufgeladen werden muss. Wird die Empfangseinheit in der Dockingstation platziert, funktioniert die Einheit ebenfalls als Aufladegerät für einen zweiten Akku und ermöglicht so einen kontinuierlichen Betrieb.

Zuverlässige Technologie

smartX® arbeitet mit einem Bluetooth™ Standard, der speziell für medizinische Umgebungen entwickelt wurde. Bluetooth™ ist ein weltweit anerkannter, kabelloser Kommunikationsstandard.

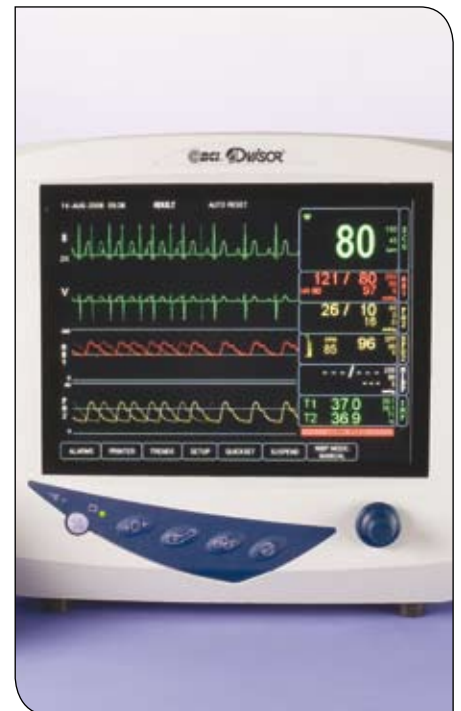

Kabellose Flexibilität

smartX® kann auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und bietet Ihnen dort einen großen Nutzen, wo Sie ihn benötigen. smartX® ist mit Medex® LogiCal® Einwegartikeln kompatibel und bietet Ihnen innerhalb des Krankenhauses eine völlige Systemflexibilität. smartX® kann als Ergänzung oder als Ersatz für vorhandene Kabelsysteme verwendet werden.

Einfache Einrichtung



Die Empfangseinheit sucht mittels Bluetooth™ den passenden Sender.



Anhand der einfach aufgebauten Tastatur lässt sich die passende Sendereinheit leicht auswählen.

smartX® kabelloses Blutdruckmessgerät

BESTELLDATEN

Produkt	Produktcodes	VE
smartX®		
smartX® Sender für 2 Druckwandler	SMXT2	
smartX® Sender für 4 Druckwandler	SMXT4	
smartX® Empfänger	SMXR	
smartX® Dockingstation	SMXD	
smartX® Wiederaufladbare Batterie (x2)	SMXB	2
smartX® LogiCal® Druckwandler (x5)	MX970C2	5

smartX® Sender und Dockingstation können anhand von Standardhalterungen mit 3 mm Schlitz befestigt werden.



Halter:

MX240P1

MX241P1 (mit Gelenkverbindung)

* smartX® ist mit den meisten Vitalzeichenmonitoren kompatibel, die heutzutage erhältlich sind. Kontaktieren Sie bitte Smiths Medical, um sich über die Kabelanforderungen beraten zu lassen.



DIE IN DIESER BROSCHÜRE ANGEgebenEN INFORMATIONEN GELTEN ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG.
DAS UNTERNEHMEN BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE DARGESTELLTEN PRODUKTE ZU VERBESSERN.

Smiths Medical Deutschland GmbH Bretonischer Ring 3, D-85638 Grasbrunn, Tel. +49 89 242959-300, Fax +49 89 242959-310

Smiths Medical Österreich GmbH Campus 21, Europaring A 03 5 02, A-2345 Brunn am Gebirge, Tel. +43 1 86670-21556, Fax +43 1 86670-21566

Smiths Medical Schweiz AG Ringwiesenstrasse 2, 8600 Dübendorf, Tel. +41 43 38862-00, Fax +41 43 38862-11

www.smiths-medical.com

SmithsMedical – a part of Smiths Group plc

Das Smiths Medical Logo, smartX, Medex, LogiCal sind eingetragene Warenzeichen von Smiths Group plc.
Copyright 2009 Smiths Medical Family of Companies. Alle Rechte vorbehalten. Literatur-Nr. ZYP-120_02/2009

smiths medical