

# GRIPPER<sup>®</sup> Micro

## Niet-borende veiligheidsnaald met stompe canule



*Veilig en comfortabel*

**VASCULAR ACCESS**

**Deltec**<sup>TM</sup>

# GRIPPER® Micro veiligheidsnaald voor Port-a-Cath®

## Een revolutionair ontwerp dat past in het dagelijkse leven van uw patiënt.

De unieke eigenschappen die de populaire GRIPPER PLUS® naald zo veilig en comfortabel maken, zijn ook geïntegreerd in de nieuwe GRIPPER® Micro veiligheidsnaald. Deze veiligheidsnaald beschikt daarnaast over een aantal nieuwe eigenschappen die het dé ideale naald maken voor slanke patiënten, kinderen en bij langdurige of veelvuldige infusie.

De nieuwe GRIPPER® Micro veiligheidsnaald bestaat uit twee delen: een veiligheidsinbrengnaald en een stompe infusiecanule. Als de naald in de Port-a-Cath is ingebracht, wordt de trocaar veilig verwijderd en blijft er enkel een klein Micro Gripper® op de huid van de patiënt, en biedt het alle voordelen wat u van de Gripper® gewend bent.



Niet-borende veiligheidsnaald met stompe canule



Kleine GRIPPER® Micro voor patiëntcomfort

Eigenschappen van de GRIPPER® Micro veiligheidsnaald

- Een revolutionair ontwerp.
- Een niet borende trocaar, om de canule in te brengen en kan veilig verwijderd en weggegooid worden.
- Een stompe infusiecanule, die na gebruik veilig kan worden verwijderd.
- De GRIPPER® Micro veiligheidsnaald heeft 40% grotere flow rate dan andere hubernaalden met dezelfde buitendiameter.

## Eenvoudig en veilig inbrengen



Breng de naald in de poort.



Druk op het lipje en licht de veiligheidsarm op totdat u een klik hoort. Gooi vervolgens het inbrengstuk en de vastgezette trocaar weg in een naaldcontainer.



Er blijft enkel een kleine GRIPPER® Micro achter.

### BESTELINFORMATIE

Gauge	Lengte		Productcode	
	inch	mm	Zonder Y-site	Met naaldloze connector/NAC
19	¾	19	21-3260-24	21-3280-24
19	1	25	21-3261-24	21-3281-24
20	¾	19	21-3256-24	21-3276-24
20	1	25	21-3257-24	21-3277-24
22	¾	19	21-3251-24	21-3271-24
22	1	25	21-3252-24	21-3272-24

DE INFORMATIE IN DEZE FOLDER WAS ACTUEEL OP HET MOMENT VAN DRUKKEN. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN AAN DE GETOONDE HULPMIDDELEN

#### Smiths Medical Nederland B.V.

Postbus 126, 5240 AC Rosmalen  
T 073-528 50 50 F 073-521 23 36  
nederland@smiths-medical.com

#### Smiths Medical Belgium N.V.

Excelsiorlaan 13 Bus 6, 1930 Zaventem  
T 02-704 49 00 F 02-720 44 34  
belgium@smiths-medical.com

Smiths Medical, onderdeel van het wereldwijd opererende technologiebedrijf Smiths Group

GRIPPER PLUS, PORT-A-CATH en het Deltec- en Smiths Medical-logo zijn handelsmerken van de Smiths Medical bedrijvengroep. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk geregistreerd is bij het Amerikaanse U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen.

Literatuurnummer LIT/VA2936 ©2008 Smiths Medical. bedrijvengroep. Alle rechten voorbehouden.

smiths medical