

Pompe Ambulatoire CADD®-Solis v3.0

Paramétrer la pompe lors d'une nouvelle programmation



1

Voulez-vous démarrer une nouv. programmation? Appuyer sur **Oui**

2

50 mL A l'arrêt

Sélect. Traitement
App. s/ sélect pr choisir

PCA IV
Péridurale
Bloc Nerveux Périphérique

Retour

50 mL A l'arrêt

PCA IV

Sélect. Crit. qual.
App. s/ sélect pr choisir

Dose normale
Dose élevée

Adulte Post-opératoire

Retour

50 mL A l'arrêt

PCA IV
Adulte post-opératoire 1 mg/mL

Sélect. Médic.
App. s/ sélect pr choisir

Morphine 1 mg/mL

Retour

Choisir un **Traitement**, appuyer sur **sélect**

Un **Critère qualitatif**, appuyer sur **sélect**

Un **Médicament**, appuyer sur **sélect**

3

Déverrouiller le clavier (code ou clé)

4

Est-ce correct?
Appuyer ensuite sur **Oui**

5

Revoir param. pompe.
Appuyer sur **Revoir**

6

Vérifier minutieusement les paramètres de programmation. Appuyer sur **Valider** pour chaque paramètre ou sur **sélect** pour modifier.

7

Appuyer sur **Suivant**, lorsque que la vérification est terminée.

8

Ce message apparaît si la cassette n'est pas fixée : **Cassette non fixée**. Fixer la cassette avant de démarrer la pompe.
Fixer et **verrouiller** la cassette à la pompe.

9

Purger la tubulure ? Vérifier que la tubulure est bien déconnectée du patient. Appuyer sur **Oui** puis **Purger**. Appuyer sur **Arrêter la purge** lorsque la purge est terminée.

10

Continuer la purge ? Appuyer sur **Non**.

11

Connecter la tubulure au patient.
Démarrer la pompe ? Appuyer sur **Oui** si tout est prêt pour débuter la perfusion.

Pour plus d'informations, visiter notre site web www.smiths-medical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical France
3 rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tel : +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361

www.smiths-medical.com

Smiths Medical fait partie du groupe mondial de haute technologie Smiths Group plc. Consulter le mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir la liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions d'emploi. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical.
©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193533FR-082019

MPAUC-1504

Rx ONLY **CE**
2797

smiths medical