



## Pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>- Solis VIP Mode Paliers Variables


### PROGRAMMATION NOUVEAU PATIENT



1. Pour démarrer la programmation, appuyer sur le bouton **Tâches**.




2. Avec **▼** sélectionner **Voir les tâches avancées** + **select**.

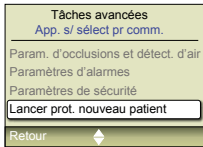


3. Avec **▼**, sélectionner **Lancer prot. nouveau patient** + **select**.

4. Entrer le code de sécurité **▼** ou **▲**+ **select**.

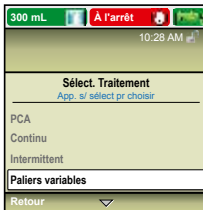

5. Avec **▼** ou **▲**, sélectionner **Continu** + **select**.  
Sélectionner **[Progr. manuel]** ou un protocole existant + **select**.  
Si protocole, sélectionner le nom de la molécule + **select**.

6. Sélectionner **Oui** pour confirmer le choix. Sélectionner **Revoir** pour voir les paramètres de la pompe.

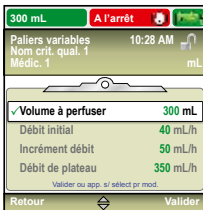

Volume de perfusion: volume total de liquide à perfuser  
Volume résiduel: volume du réservoir (cassette ou poche)  
Incrément du débit: Quantité de médicament additionnel entre 2 paliers.  
Tous les paliers auront obligatoirement le même incrément  
Débit de plateau: Débit maximum auquel le médicament doit être perfusé

7. Ensuite, ajuster chaque paramètre de programmation. Sélectionner un paramètre + **select** puis **▼** ou **▲** et enfin **Confirmer**.

8. Vérifier que chaque paramètre est validé. Le symbole **✓** apparaît sur la gauche + **Suivant**.

9. Retirer la pince bleue et connecter la tubulure. Suivre les instructions de la pompe jusqu'au démarrage.

10. Démarrer la pompe.



# Changement de consommable

## Même volume à perfuser, même programmation

Bouton  
Marche/  
Arrêt



1. Allumer la pompe.



2. Retirer la pince bleue puis fixer le consommable à la pompe.

3. La pompe demande **Purger la tubulure?**

Sélectionner **Oui** pour purger la tubulure. Sélectionner **Non** si la tubulure a été purgée manuellement.

4. La pompe demande **Réinitialiser volume résiduel à XXmL?**

Sélectionner **Oui** pour confirmer.

5. Entrer le code de sécurité avec  ou  + **select** si besoin.

6. Suivre les instructions pour purger la tubulure.

7. Démarrer la pompe.

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical France**  
3, rue du Pont des Halles  
94656 RUNGIS Cedex  
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00  
Email: [france@smiths-medical.com](mailto:france@smiths-medical.com)

MPAUCA-1644



**smiths medical**

Find your local contact information at: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et mises en garde. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs. Les produits référencés sont marqués CE.  
©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193592FR-082019