


Aguja hipodérmica de seguridad Needle-Pro® EDGE™

PAUTAS PASO A PASO

IMPORTANTE: consulte las instrucciones de uso suministradas con el producto para obtener instrucciones detalladas, advertencias y precauciones.


1 Retirar el dispositivo

Abrir el blister y retirar el dispositivo. (No toque el protector de la aguja.) Sujetar la funda con la bolsa de plástico. Para evitar la contaminación, no tocar el conector Luer del dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™. [Fig. 1]. Empujar la jeringa y girar la aguja un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj para acoplarla a la conexión Luer del dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™.

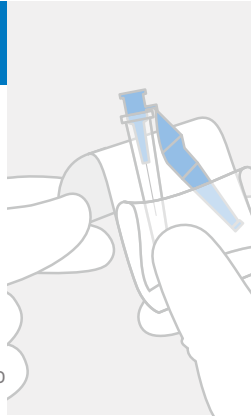


2 Administrar

Con el bisel de la aguja hacia arriba [Fig. 2], tirar del protector de la aguja para extraerla. Preparar la medicación. Purgar aire y administrar medicamentos.

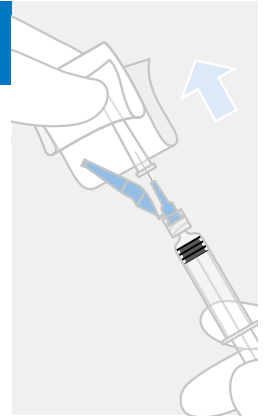


3A Activar

Activar el dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™ utilizando una técnica con una sola mano presionando suavemente la funda del dispositivo de protección de la aguja contra cualquier superficie plana. NO use su mano libre para presionar la funda protectora sobre la aguja. Cuando se presiona la funda, la aguja se activa firmemente en la funda con un clic audible. [fig 3a y 3b]

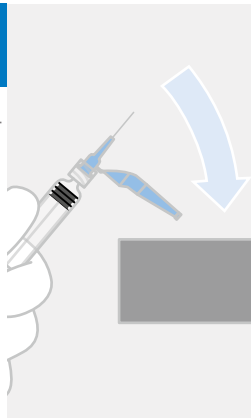


3B Confirmar

Confirme visualmente que la aguja esté completamente enganchada en la funda de protección de la aguja. Deseche todo el dispositivo en un recipiente para objetos cortantes aprobado, inmediatamente después de activar la función de seguridad.

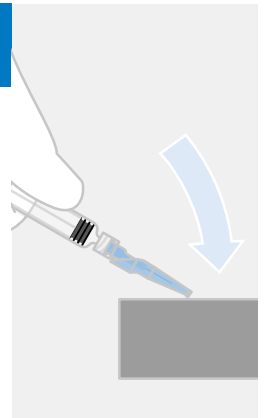

4 Técnica alternativa

Si el procedimiento clínico requiere el uso de una técnica de dos agujas (una aguja para preparar el medicamento y otra para administrarlo), retirar el dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™ acoplado de la jeringa con un movimiento de giro fácil después de extraer la medicación. Agarrar la base de la punta de la aguja con el pulgar y el índice al girar, manteniendo los otros dedos alejados del extremo del dispositivo de seguridad. [fig 4]

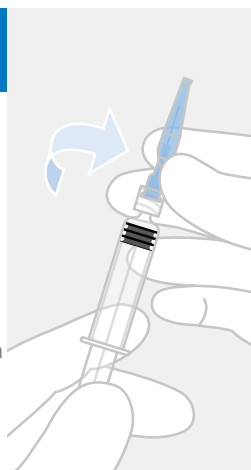


5 Desechar + Repetir

Desechar el dispositivo acoplado [fig. 5] y seleccionar una segunda aguja con el dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™.

Después de colocar una nueva aguja con el dispositivo de seguridad Needle-Pro® EDGE™ en la jeringa, repetir todos los pasos necesarios con la segunda aguja.

Desechar todo el dispositivo inmediatamente después de activar la función de seguridad.

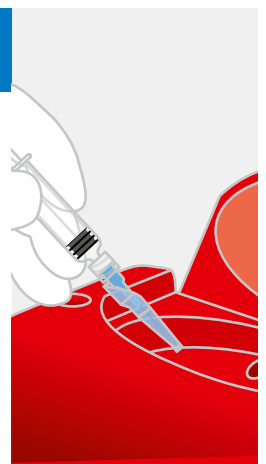

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361

Smiths Medical España S.r.l
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00

www.smiths-medical.com

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Needle-Pro, Edge, Jelco y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo © indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. ©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195227ES-112019

MKEECA-0202

CE
2797

smiths medical