


## Dispositivo de eliminación de burbujas de aire Filter-Pro® para Portex®

### Directrices paso a paso


El dispositivo Filter-Pro® permite expulsar burbujas de aire del interior de una muestra de sangre arterial de forma segura, sin riesgo de exposición a sangre o a patógenos de transmisión hemática.



- Introduzca el dispositivo Filter-Pro® en el cono de acoplamiento Luer de la jeringa asegurándose de que esté bien fijado.

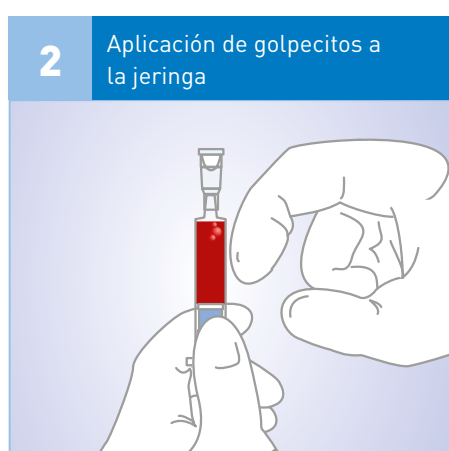

- Sostenga el extremo Luer de la jeringa hacia arriba y dele golpecitos para mover las burbujas de aire a la parte superior.

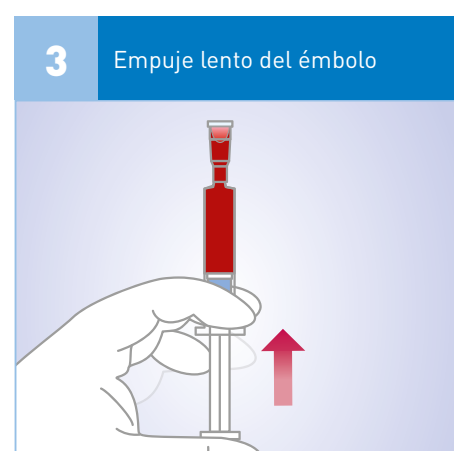

- Empuje el émbolo **lentamente** para extraer el aire de la muestra. El filtro se sella al entrar en contacto con la sangre, lo que permite que el dispositivo Filter-Pro® sirva como tapón de transporte.
- Mezcle la muestra sosteniendo la jeringa y girando la muñeca hacia atrás y hacia delante durante 20-30 segundos.
- Etiquétela y trasládelas. Los análisis deberán realizarse en los 30 minutos posteriores a la extracción

Para obtener más información, visite [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical España S.r.l.**  
Avda. Diagonal 635  
08028, Barcelona  
Tel: +34 93 363 84 00

MKEECA-0172



smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Portex, Filter-Pro y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de los nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195297ES-102019