


## Dispositivo de Remoção de Bolhas de Ar Portex® Filter-Pro®

### Linhas de Orientação Passo-a-Passo


O dispositivo Filter-Pro® permite-lhe expelir em segurança bolhas de ar de uma amostra de sangue arterial sem o risco de exposição do sangue a agentes patogénicos transmissíveis pelo sangue.



- Empurre o dispositivo Filter-Pro® para dentro da seringa Luer, certificando-se de que fica preso.

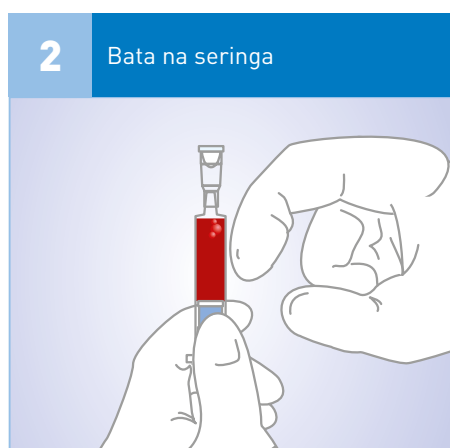

- Segure a seringa Luer com a ponta virada para cima e bata-lhe para mover as bolhas de ar para o topo.

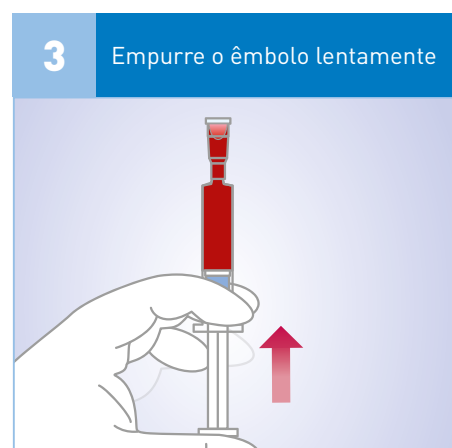

- Empurre o êmbolo **lentamente** para expelir ar da amostra. O filtro veda em contacto com o sangue permitindo que dispositivo Filter-Pro® atue como uma tampa de transporte.
- Misture a amostra segurando a seringa e movendo o seu pulso para trás e para a frente durante 20 a 30 segundos.
- Coloque rótulo e transporte. O teste deverá ser feito dentro de 30 minutos após a colheita de sangue.

Para mais informações, visite o site [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

0(S) PRODUTO(S) DESCRITO(S) PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ E NOUTROS PAÍSES

Smiths Medical ASD, Inc.  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Smiths Medical Portugal Lda  
Av. Eng. Duarte Pacheco,  
Amoreiras, Torre 2 15º A  
1070-102 Lisboa  
Tel: +351 22 532 30 10

MKEECA-0172



smiths medical

As informações de contacto locais estão disponíveis em: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contra-indicações, advertências e precauções, consulte as Instruções de utilização/Manual do operador. Portex, Filter-Pro e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. O símbolo ® indica que a marca comercial está registada no Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são as marcas comerciais ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. O produto referenciado possui marcação CE ©2019 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. SS195297PT-102019