

### RÉSULTATS DES TESTS DE PERFORMANCE RÉALISÉS AVEC DES COUVERTURES SNUGGLE WARM<sup>®</sup> ET DES RÉCHAUFFEURS CONCURRENTS

Dispositifs	Marque	Modèle	Consigne de température
<b>Réchauffeurs concurrents</b>	Bair Hugger™	505	32, 38, 43 °C
	Bair Hugger™	750	32, 38, 43 °C
	Bair Hugger™	775	32, 38, 43 °C
	Warm Touch <sup>®</sup>	WT-5900 (Équivalent aux modèles 5200, 5300 au Japon)	32, 38, 43, 45 °C
	TSCI Mistral-Air <sup>®</sup>	MA1100	32, 38, 43 °C
	Références	Description	Échantillons
<b>Couvertures Snuggle Warm<sup>®</sup></b>	SW-2001 (Actuelle SWU-2001)	Couverture Corps complet Adulte	13
	SW-2004 (Actuelle SWU-2004)	Couverture Bas de corps Adulte	13
	SW-2010 (Actuelle SWU-2010)	Couverture Haut de corps Petit modèle	13

Les 3 modèles de couvertures ci-dessus ont été raccordés à chaque réchauffeur concurrent, pour chaque consigne de température.

#### Résultats des tests (température stabilisée)

Réchauffeur concurrent	Temp. sélectionnée	Valeurs acceptables	Température moyenne mesurée °C	Réussite/Échec
<b>Bair Hugger™ 775</b> Réglage min du ventilateur	@ 43 °C	41.5 °C - 44.5 °C	44.23	Réussite
	@ 38 °C	36.5 °C - 39.5 °C	38.31	Réussite
	@ 32 °C	31.5 °C - 33.5 °C	32.28	Réussite
<b>Bair Hugger™ 775</b> Réglage max du ventilateur	@ 43 °C	41.5 °C - 44.5 °C	43.87	Réussite
	@ 38 °C	36.5 °C - 39.5 °C	37.68	Réussite
	@ 32 °C	31.5 °C - 33.5 °C	31.81	Réussite
<b>Bair Hugger™ 750</b>	@ 43 °C	41.5 °C - 44.5 °C	43.79	Réussite
	@ 38 °C	36.5 °C - 39.5 °C	38.37	Réussite
	@ 32 °C	31.5 °C - 33.5 °C	32.19	Réussite
<b>Bair Hugger™ 505</b>	@ 43 °C	40.0 °C - 46.0 °C	45.36	Réussite
	@ 38 °C	35.0 °C - 41.0 °C	38.49	Réussite
	@ 32 °C	29.0 °C - 35.0 °C	32.30	Réussite
<b>Warm Touch<sup>®</sup> 5900</b> (Équivalent aux modèles 5200, 5300 au Japon)	@ 45 °C	44.0 °C - 46.0 °C	45.13	Réussite
	@ 43 °C	41.0 °C - 45.0 °C	43.01	Réussite
	@ 38 °C	36.0 °C - 40.0 °C	37.77	Réussite
	@ 32 °C	30.0 °C - 34.0 °C	31.60	Réussite
<b>Mistral Air<sup>®</sup></b>	@ 43 °C	41.5 °C - 44.5 °C	43.72	Réussite
	@ 38 °C	36.5 °C - 39.5 °C	38.14	Réussite
	@ 32 °C	31.5 °C - 33.5 °C	32.44	Réussite

- Les températures ont été relevées 1h-4h-8h après la mise en marche de chaque combinaison.<sup>1</sup> La température maximale n'a pas excédé 48°C ; la température moyenne n'a pas excédé 46°C, dans aucune configuration.<sup>2</sup>
- Les réchauffeurs ne se sont jamais mis en alarme, dans aucune configuration.

1 Seule la température stabilisée a été mesurée sur le réchauffeur Warm Touch<sup>®</sup> 5900 avec une consigne de température à 45°C, puisque cette consigne ne doit pas être utilisée plus de 45 minutes.

2 Valeurs de température de couverture définies par IEC 80601-2-35:2009 Part 2-35.

Pour de plus amples informations, visitez notre site [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

MPAUC-1529

**Rx** **CE**  
**ONLY** **2797**

**smiths medical**

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé porte le marquage CE. ©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. TM194886FR-072019