



Dispositivo per rimuovere le bolle d'aria Portex® Filter-Pro®

Linee guida dettagliate


Il dispositivo Filter-Pro® consente di espellere le bolle d'aria da un campione di sangue arterioso in maniera sicura, senza rischio di esposizione al sangue o ad agenti patogeni a trasmissione ematica.

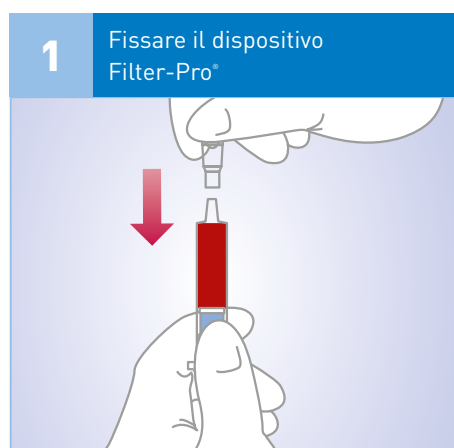

- Spingere il dispositivo Filter-Pro® sul Luer della siringa, assicurandosi che risulti ben fissato.

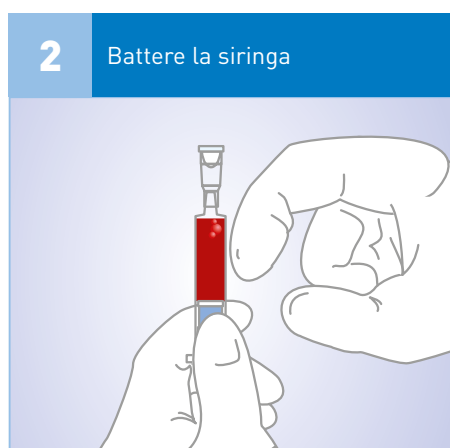

- Tenere l'estremità del Luer della siringa verso l'alto e batterla per spostare le bolle d'aria nella parte superiore.

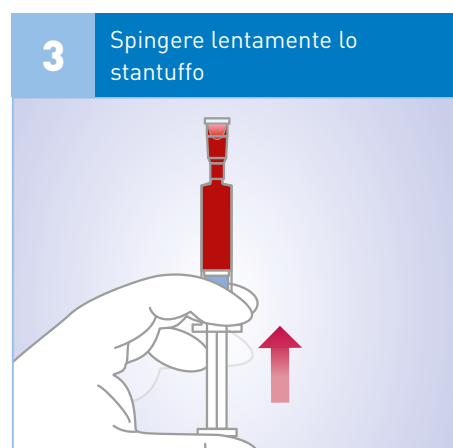

- Spingere lentamente lo stantuffo per espellere l'aria dal campione. Le guarnizioni del filtro a contatto con il sangue consentono al dispositivo Filter-Pro® di fungere da tappo di trasporto.
- Miscelare il campione tenendo la siringa e ruotando il polso in avanti e indietro per 20-30 secondi.
- Etichettare e trasportare. Il test dovrà essere effettuato entro 30 minuti dalla raccolta.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.smiths-medical.com

O(S) PRODUTO(S) DESCRITO(S) PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ E NOUTROS PAÍSES

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431
Tel: +1-603-352-3812
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Italia
Via della stazione, 2
04013 Latina Scalo (LT)
Tel: +39 0773 40841

Le informazioni sui contatti locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Portex, Filter-Pro e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio di fabbrica è registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195297IT-122018

MKEECA-0172



smiths medical