


# smiths medical

bringing technology to life



## Lanceta de seguridad Safe-T-Lance® Plus -Activación con botón

Seguras. Cómodas. Eficaces.

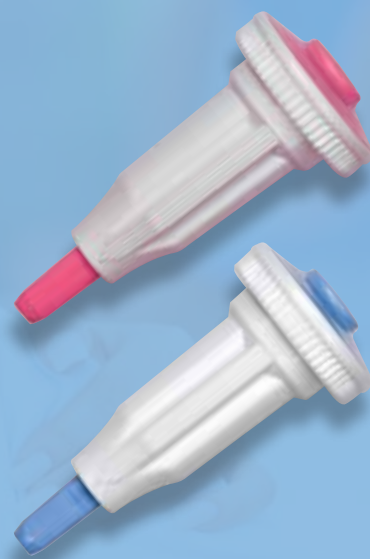

## 3 SENCILLOS PASOS



**1.** Gire el tapón de protección y tire de él para extraerlo.



**2.** Presione con firmeza el cuerpo de la lanceta de seguridad Safe-T-Lance® Plus y pulse el botón para activar el dispositivo.



**3.** Apriete con suavidad de forma intermitente cerca del lugar de punción para obtener el volumen de sangre necesario.

*ADVERTENCIA: No la utilice si el tapón de protección si se ha extraído previamente de la lanceta. Limpie la piel de acuerdo con los procedimientos habituales de seguridad. Deseche la lanceta usada en un contenedor de objetos punzocortantes de acuerdo con las directrices del centro y las regulaciones nacionales y estatales.*

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### SEGURIDAD


- De un solo uso
- Retracción de la aguja y bloqueo automáticos
- Prevención de lesiones por punción y de infección cruzada

### EFICACIA

- Amplia gama de productos: disponible en 6 tamaños diferentes
- Extracción de la cantidad adecuada de sangre para diferentes pruebas capilares

### COMODIDAD

- Fácil de usar en solo tres pasos
- Diseñada para controlar la profundidad de la aguja
- Acción de doble resorte
- Agujas recubiertas de silicona
- Empuñadura ergonómica para un manejo preciso

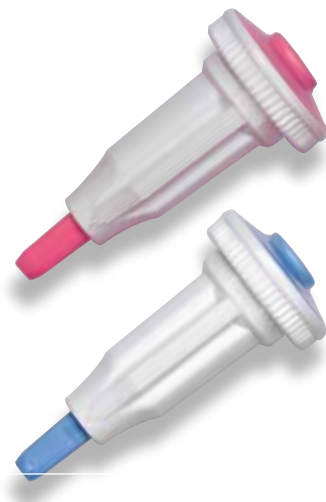

### Lanceta Safe-T-Lance® Plus

	Pedriática 1028-1	Cuchilla de 1.5mm	Profundidad de 1.2mm		Flujo normal 1014-1	Aguja de calibre 21G	Profundidad de 1.8mm
	Flujo máximo 1005-1	Cuchilla de 1.5mm	Profundidad de 1.6mm		Flujo bajo 1020-1	Aguja de calibre 25G	Profundidad de 1.4mm
	Flujo alto 1008-1	Aguja de calibre 18G	Profundidad de 1.8mm		Micro flujo 1025-1	Aguja de calibre 28G	Profundidad de 1.4mm

Cantidad de pedido: 200 unidades/caja, 2000 unidades/caja

Para obtener más información, visite nuestra página web [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

#### Distribuido por:

Smiths Medical ASD, Inc.  
Keene, NH 03431,  
EE. UU. Teléfono: 1-603-352-3812  
Número gratuito para EE. UU.: 1-800-258-5361

#### Smiths Medical España S.r.l.

Avda. Diagonal 635  
08028, Barcelona  
Tel: +34 93 363 84 00

#### Fabricado por:

HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków POLAND

MKEECA-0094

**CE**  
0473 **Rx**  
ONLY

Puede encontrar la información de contacto local en [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

**smiths medical**

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso/manual del operador si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Las marcas de diseño Jelco y Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. Safe-T-Lance es una marca comercial registrada de HTL-STREFA S.A., utilizada con permiso. ©2016 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195429ES-122016