


smiths medical

bringing technology to life



**Lancetta di sicurezza
Safe-T-Lance® Plus –
Attivazione a pulsante**

Sicura. Confortevole. Efficace.

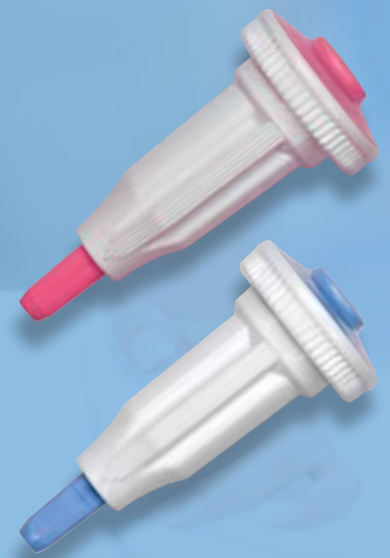

3 FACILI PASSAGGI



1. Svitare il cappuccio protettivo e rimuoverlo tenendolo dritto.



2. Premere con decisione il corpo della lancetta di sicurezza Safe-T-Lance® Plus sul sito della puntura e premere il pulsante per attivare il dispositivo.



3. Fare pressione delicatamente intermittente vicino al sito della puntura per ottenere il volume di sangue necessario.

AVVERTENZA: non utilizzare se il cappuccio protettivo è stato precedentemente rimosso dalla lancetta. Pulire la cute seguendo le procedure di sicurezza previste. Gettare la lancetta usata in un contenitore per taglienti in conformità con le linee guida della struttura e le normative nazionali e statali.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

SICUREZZA


- Esclusivamente monouso
- Retrazione e bloccaggio automatici dell'ago
- Prevenzione di lesioni da puntura e infezioni crociate

EFFICACIA




- Ampia gamma di prodotti – disponibile in 6 misure differenti
- Preleva la corretta quantità di sangue per test capillari differenti

CONFORT

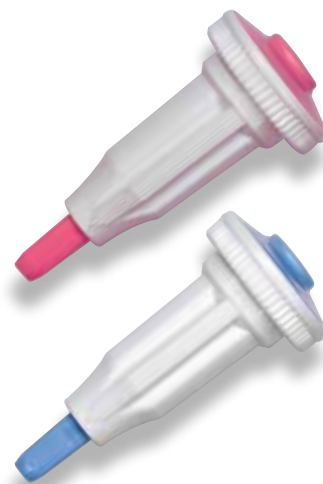- Facile da usare con soli tre passaggi
- Progettata per controllare la profondità dell'ago
- Azione a doppia molla
- Aghi rivestiti in silicone
- Impugnatura ergonomica per un maneggiamento preciso



Lancetta Safe-T-Lance® Plus

	Pediatrica 1028-1	Lama 1,5 mm	Profondità 1,2 mm		Flusso normale 1014-1	Ago da 21G	Profondità 1,8 mm
	Flusso max 1005-1	Lama 1,5 mm	Profondità 1,6 mm		Flusso basso 1020-1	Ago da 25G	Profondità 1,4 mm
	Flusso elevato 1008-1	Ago da 18G	Profondità 1,8 mm		Flusso micro 1025-1	Ago da 28G	Profondità 1,6 mm

Quantità ordinabile: 200 unità/confezione, 2000 unità/scatola

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.smiths-medical.com

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Distribuito da:

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431, Stati
Telefono: 1-603-352-3812
Numero verde Stati Uniti: 1-800-258-5361

Smiths Medical Italia

Via della stazione, 2
04013 Latina Scalo (LT)
Tel: +39 0773 40841
www.smiths-medical.com

Prodotto da:

HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLONIA

MKEECA-0094

CE
0473 **Rx**
ONLY

smiths medical

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical fa parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso/il Manuale d'uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Jelco e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths Medical. Safe-T-Lance è un marchio registrato di HTL-STREFA S.A., usato su autorizzazione.
©2016 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195429IT-122016