

smiths medical

bringing technology to life



DeltaVen® - PVK med slutet system


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Att hitta en kateter som klarar behålla stabilitet vid en automatisk injektion kan vara en utmaning. DeltaVen® har utformats för att möta alla dina behov av automatisk injektion.

EN KATETER SOM ÄR UTFORMAD FÖR ATT FÖLJA MED PATIENTEN ÖVER HELA SJUKHUSET

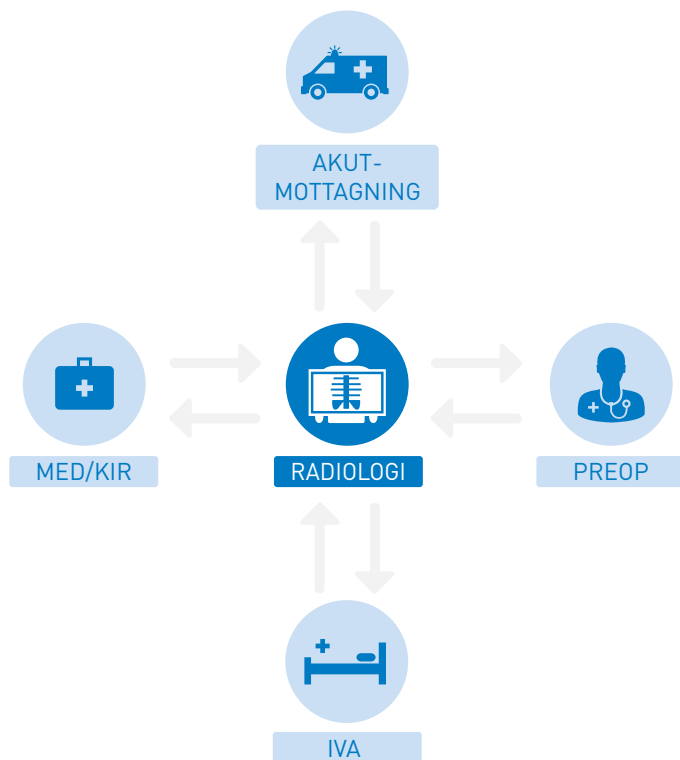

- Den enda kateter som är betecknad med 330 PSI* med flödes hastigheter upp till 8 ml per sekund i en 20 G kateter
- Hjälper till att eliminera behov av extra kateterstick vid radiologi, CT eller andra områden
- Fast anslutet förlängningsset minskar risken för kontamination på grund av upprepade fränkopplingar och återanslutningar

*Se den bruksanvisning som medföljer enheten för en fullständig lista över indikationer och försiktighetsåtgärder.

ANGIVET TRYCK 330 PSI I GAUGESTORLEKARNA 24 TILL OCH MED 16

IV-kateterstorlek, gauge	IV-kateterlängd (mm)	Maxflöde vid 20 °C (ml/s)	Maxflöde vid 37 °C (ml/s)
24 G	19	4	5
22 G	19	5	6
	25	5	5
20 G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18 G	25	8	9
	32	7	9
16 G	45	7	9
	32	>10	>10

Kontrastmedel som använts: IOMERON 400 med 27,5 mPa.s. viskositet vid 20 °C och 12,6 mPa.s. vid 37 °C. Delta Med data på fil.



Besök vår webbplats på www.smiths-medical.com för mer information

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Smiths Medical Sverige AB:
Box 1143
164 22 Kista, SVERIGE
Tel: 08-594 772 5
www.smiths-medical.com

Tillverkas av:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1686

**Rx
ONLY**

smiths medical

Hitta information om din lokala kontakt på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Designmärket Smiths Medical är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Symbolen ® indikerar att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket och i vissa andra länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör sina respektive ägare. Angivna produkter är CE-märkta. ©2017 Smiths Medical. Med ensamrätt. SS195459SV-082017