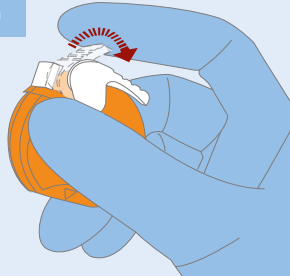
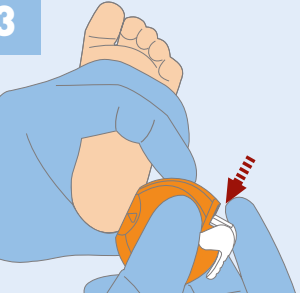
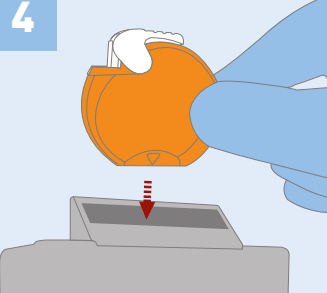
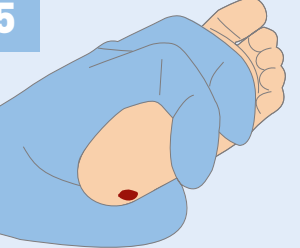


## Lancettes de sécurité Neoheel™

### Guide d'utilisation rapide

 <p><b>1</b></p>	<p>Sélectionnez un site identifié dans la zone hachurée. Nettoyez le site d'incision du talon avec une compresse antiseptique et laissez la peau sécher à l'air.</p>	 <p><b>2</b></p>	<p>Tenez la lancette entre le pouce et le majeur, placés sur les côtés nervurés. Libérez le mécanisme de verrouillage du déclencheur en appuyant sur le cran de sécurité.</p>
 <p><b>3</b></p>	<p>Alignez le dispositif comme indiqué par la flèche du Neoheel™ au niveau du talon. Toute la surface plane du dispositif doit être en contact avec la peau. Appuyez sur le déclencheur.</p>	 <p><b>4</b></p>	<p>Retirez la lancette du talon du bébé et jetez-la dans un conteneur réservé aux objets tranchants présentant un risque biologique.</p>
 <p><b>5</b></p>	<p>La première goutte de sang doit être essuyée délicatement avec une compresse de gaze stérile et sèche. Appliquez une légère pression avec le pouce et relâchez de façon intermittente au fur et à mesure que des gouttes de sang se forment.</p>	 <p><b>6</b></p>	<p>Après avoir effectué le prélèvement sanguin, appliquez une compresse de gaze stérile et sèche sur le site de l'incision et appuyez doucement jusqu'à ce que le saignement cesse.</p>

Pour en savoir plus, consultez notre site: [www.smiths-medical.fr](http://www.smiths-medical.fr)

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

**Distribué par :**  
**Smiths Medical Belgium S.A.**  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tel.: +32 (0)2 704 49 00  
E-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fabriqué par :**  
**SteriLance Medical (Suzhou) Inc.**  
No. 68 Litanghe Road  
Xiangcheng, Suzhou, 215133, Chine

**Représentant agréé en Europe**  
Emergo Europe  
Molenstraat 15, 2513BH La Haye  
Pays-Bas

MKEECA-0214

Pour obtenir les coordonnées de votre représentant local : [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d'emploi pour obtenir une liste complète des avertissements et mises en gardes. Smiths Medical et neoheel sont des marques de commerce de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque de commerce est déposée auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis ainsi que dans certains autres pays. Le produit référencé porte le marquage CE. © 2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195467FRBE-112018