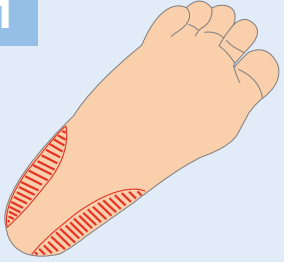
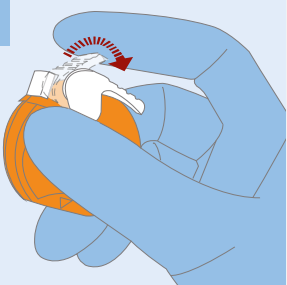
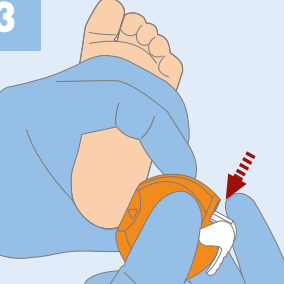
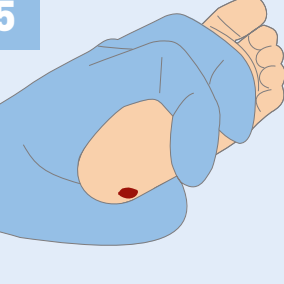



Neoheel™ säkerhetslansetter

Snabbguide

 <p>1</p>	<p>Välj ett ställe som identifierats i det skuggade området. Rengör snittstället på hälen med en antiseptisk kompress och låt huden lufttorka.</p>	 <p>2</p>	<p>Greppa lansetten med tumme och långfinger på vardera sida på den räfflade ytan. Frigör avtryckarens låsmekanism genom att trycka ner säkerhetsfliken.</p>
 <p>3</p>	<p>Placera lansetten som visas, så att pilarna på Neoheel™ pekar mot hälen. Den platta sidan måste i sin helhet vara i kontakt med huden. Tryck ned avtryckaren.</p>	 <p>4</p>	<p>Ta bort enheten från spädbarnets häls och kasseras i en behållare för biologiskt riskavfall.</p>
 <p>5</p>	<p>Den första bloddroppen ska torkas bort försiktigt med en torr, steril gaskompress. Tryck försiktigt med tummen och släpp försiktigt efterhand som blodroppar bildas.</p>	 <p>6</p>	<p>Tryck försiktigt en torr, steril gaskompress mot snittstället när blodtagningen är klar och håll den där tills blödningen upphört.</p>

Besök vår webbplats på www.smiths-medical.com för mer information

PRODUKTEN/PRODUKTERNA SOM BESKRIVS ÄR EVENTUELLT INTE LICENSERADE ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR FÖRSÄLJNING I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Distribueras av:
Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton,
Ashford, Kent, TN25 4BF
Tfn: +44 (0)845 850 0445

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
164 22 Kista, SVERIGE
Tel: +46 (0)8 594 772 50
www.smiths-medical.com

Tillverkas av:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No. 68 Litanghe Road
Xiangcheng, Suzhou, 215133, Kina

Godkänd representant inom EU
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513BH Haag
Nederländerna

MKEECA-0214

Hitta information om din lokala kontakt på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

smiths medical

Smiths Medical är en del av det globala teknikföretaget Smiths Group plc. Se bruksanvisningen för en fullständig lista över varningar och försiktighetsåtgärder. Smiths Medical och Neoheel är varumärken som tillhör Smiths Medical. Symbolen © indikerar att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket och i vissa andra länder. Den produkt det hänvisas till är CE-märkt. © 2018 Smiths Medical. Med ensamrätt. SS195467SV-112018