

Geschlossenes Kathetersystem DeltaVen®


Kurzanleitung

Vorbereitung


Reinigen Sie die Einführstelle gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung, verwenden Sie dabei das bevorzugte Antiseptikum zur Hautreinigung.

Einführen


- 1** Prüfen Sie, ob die Anschlüsse korrekt gesichert sind und sich die Klemme in der Position „offen“ befindet.

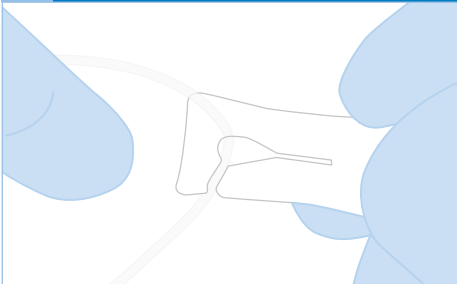


- 2** Entfernen Sie die Schutzhülse mit einer Drehbewegung, wobei Sie den farbigen Abschnitt des Flügels festhalten. Untersuchen Sie den Katheter.

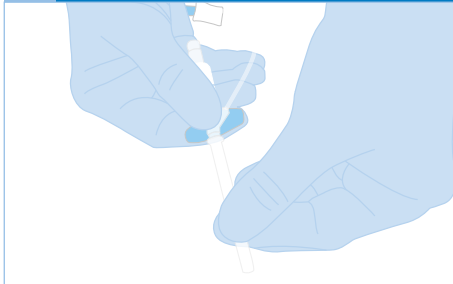


- 3** Führen Sie die Venenpunktion in einem angemessenen Einführwinkel durch. Prüfen Sie auf Rückfluss im distalen Ende des Katheters.

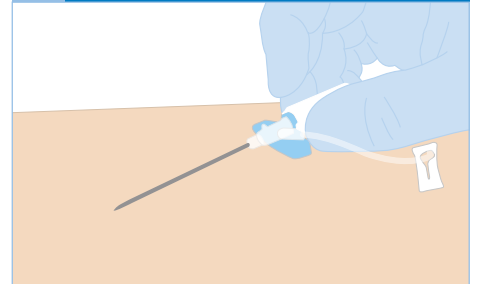


- 4** **Leichtes Drücken** - Senken Sie das DeltaVen®-Kathetersystem bis nahezu parallel zur Haut. Schieben Sie den gesamten Katheter einige Millimeter vor, um sicherzustellen, dass sich der Katheterschlauch in der Vene befindet.

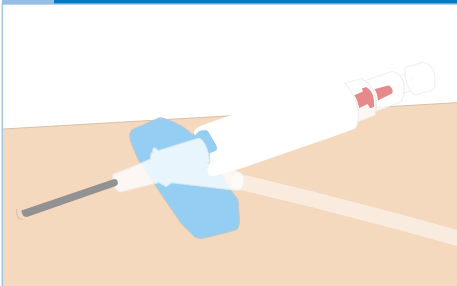


- 5** **Leichtes Ziehen** - Ziehen Sie das weiße geriffelte Gehäuse zurück, wobei Sie den Ansatz vom Sicherheitsmechanismus trennen.

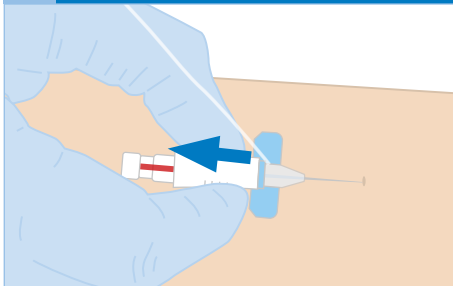


- 6** **Drücken** - Legen Sie den Katheter in die Vene, indem Sie Ihren Finger hinter der Abziehlasche einsetzen und die Kanüle stabil halten.

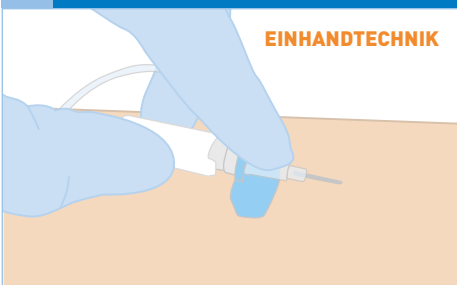

- Drücken** - Legen Sie den Katheter mit Ihrer nicht dominanten Hand in die Vene; halten Sie die Kanüle dabei stabil.

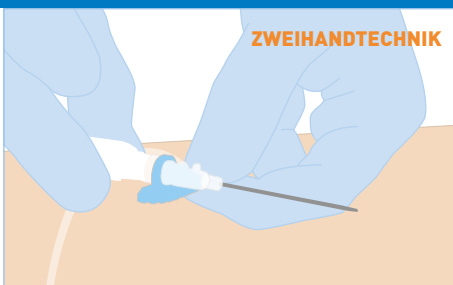

- 7** **Ziehen** - Ziehen Sie das weiße geriffelte Gehäuse bis nahezu parallel zur Haut zurück, wobei Sie den sekundären Rückfluss im Verlängerungsschlauch beobachten. Ziehen Sie, bis Sie ein Klicken hören.





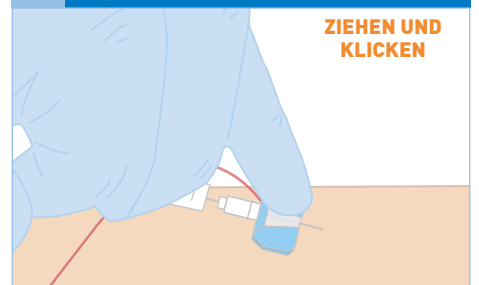


Entsorgen Sie die Kanüle mit Sicherheitsmechanismus in einem angemessenen Kanülenabwurfbehälter gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung.



Geschlossenes Kathetersystem DeltaVen®

Nach dem Einführen

Vorbereitung für die Infusion

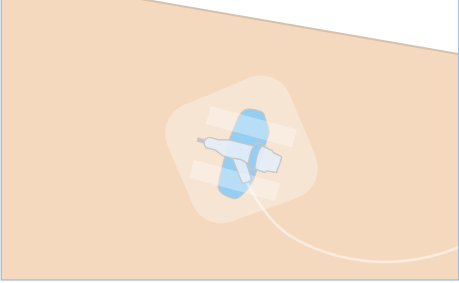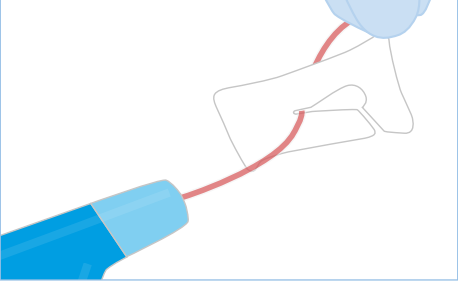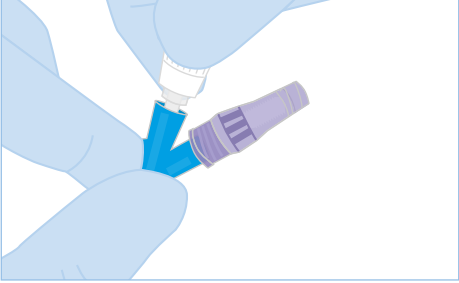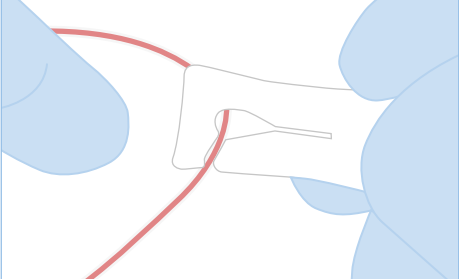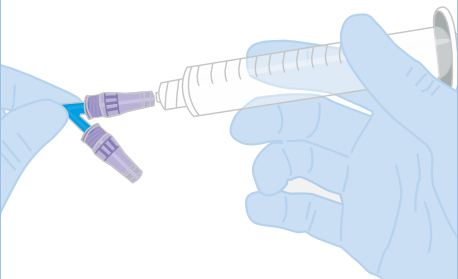- 1** Stabilisieren und sichern Sie das DeltaVen® Kathetersystem gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung.

- 2** Schließen Sie die Schiebeklemme.

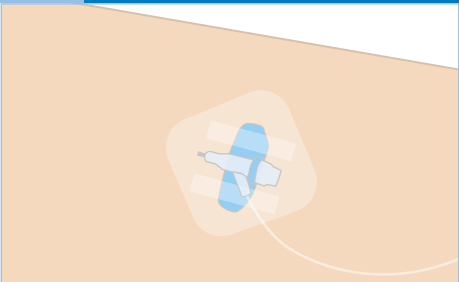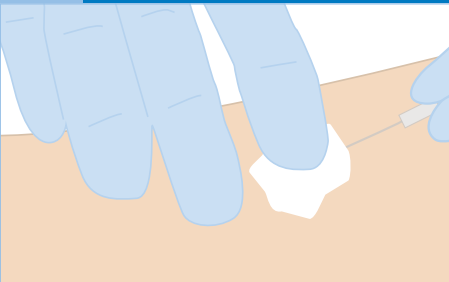- 3** Entfernen Sie den Stopfen zur Entlüftung und ersetzen Sie ihn entweder durch einen nadelfreien Konnektor oder Endkappe.

- 4** Öffnen Sie die Schiebeklemme.

- 5** Spülen Sie alle Ports, verwenden Sie eine pulsatile Spülung, um die Reinigung des Zugangs zu fördern. Schließen Sie danach die Klemme.


Pflege und Wartung

- 1** Untersuchen Sie die Punktionsstelle und spülen Sie das DeltaVen®-Kathetersystem gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung.

- 2** Entfernen Sie das DeltaVen®-Kathetersystem, wenn es nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr klinisch indiziert ist.


Besuchen Sie www.smiths-medical.com, um mehr über Blutentnahme zu erfahren.

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH.

Vertrieben von:

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 242959 0
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200

Hergestellt von

Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tel: +39 0375 785915

MPAUC-A-0060

**Rx
ONLY**

smiths medical

Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/dem Bedienerhandbuch. Die Smiths Medical Designmarke ist eine Marke von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2018 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. SS195486DE-012018