

Catéter de sistema cerrado DeltaVen®


Guía de consulta rápida

Preparación


Limpie el sitio de inserción conforme a las normas del centro con el antiséptico cutáneo preferido.

Inserción


1 Asegúrese de que las conexiones estén bien fijadas y de que la pinza esté en la posición "abierta".

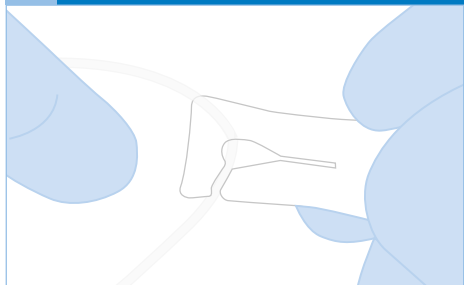


2 Saque el capuchón mediante un giro, al tiempo que sujeta la sección con aletas de colores. Inspeccione el catéter.

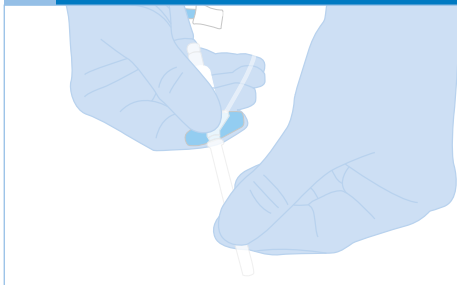


3 Realice la venopunción con el ángulo de introducción adecuado. Compruebe si hay retorno venoso en el extremo distal del catéter.

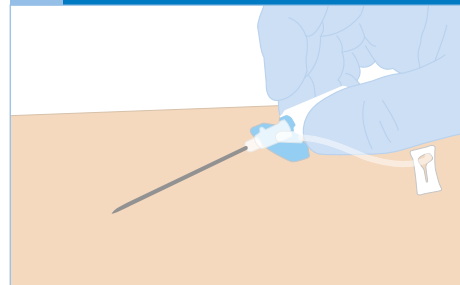


4 **Empuje suavemente:** baje el catéter DeltaVen® hasta que quede casi paralelo a la piel. Muévelo entero unos milímetros hacia adelante para asegurarse de que el tubo del catéter está en la vena.

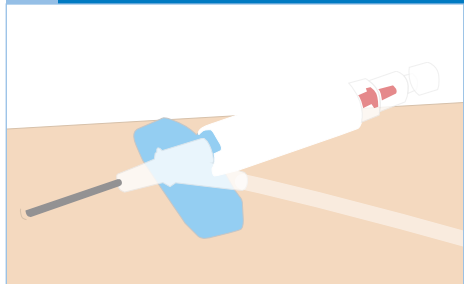

5 **Tire suavemente:** Tire hacia atrás de la carcasa ribeteada, separando el buje del mecanismo de seguridad.

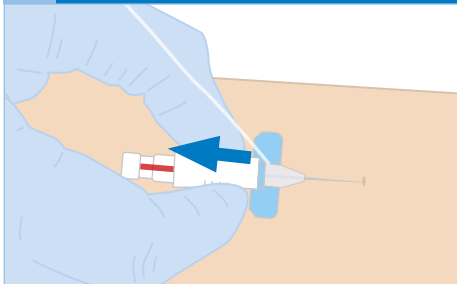


6 **Empuje:** Con el dedo por detrás de la pestaña de apoyo, introduzca el catéter en la vena manteniendo estable la aguja.

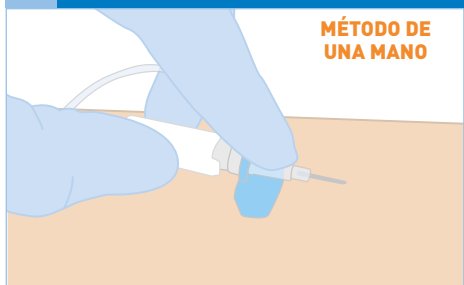


MÉTODO DE UNA MANO

Empuje: Con la mano no dominante, introduzca el catéter en la vena manteniendo estable la aguja.

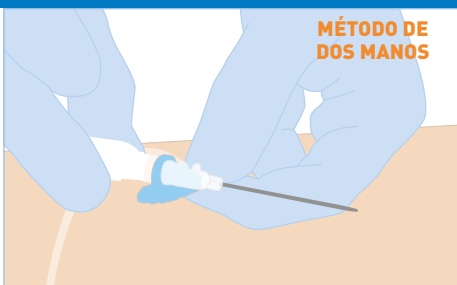

MÉTODO DE DOS MANOS

7 **Tire:** Tire hacia atrás de la carcasa ribeteada, casi en paralelo a la piel, fijándose en el retorno venoso secundario del tubo de extensión. Tire hasta oír un clic.

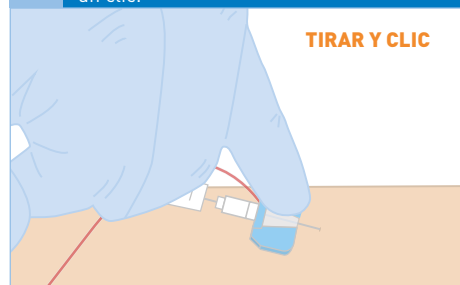






TIRAR Y CLIC

Deseche la aguja con el mecanismo de seguridad en un recipiente de objetos punzantes adecuado conforme a las normas del centro.



Catéter de sistema cerrado DeltaVen®

Después de la inserción

Preparación para la infusión

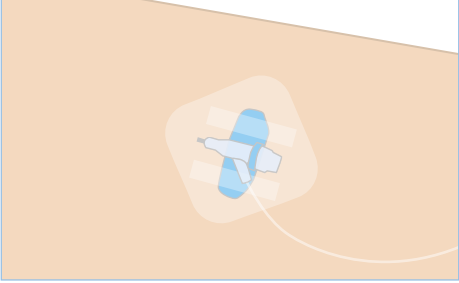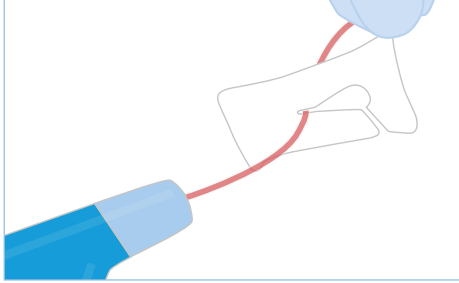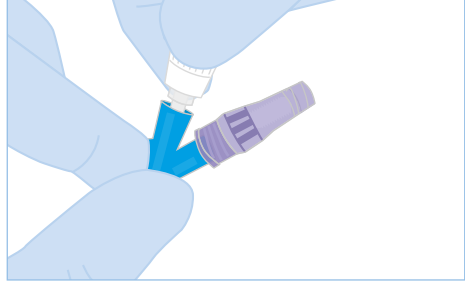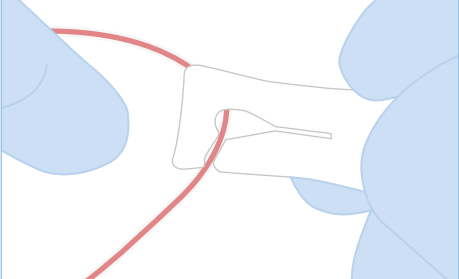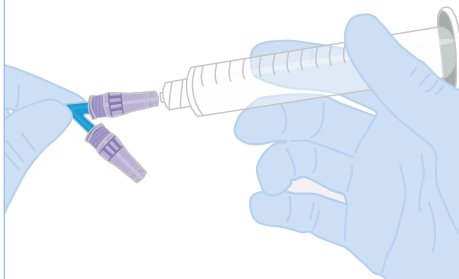- 1** Establezca y fije el catéter DeltaVen® conforme al protocolo del centro.

- 2** Cierre la pinza deslizante.

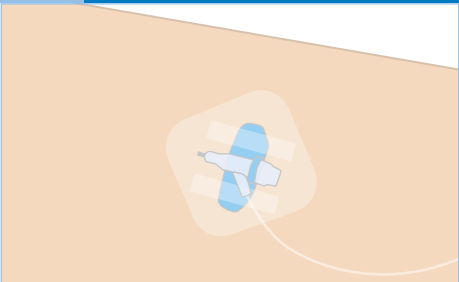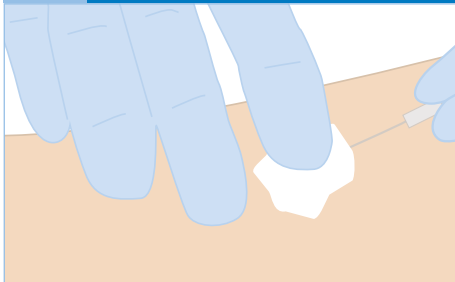- 3** Quite el tapón de ventilación y cámbielo por un conector sin aguja o un tapón.

- 4** Abra la pinza deslizante.

- 5** Enjuague todos los puertos con un lavado por pulsos para mejorar la permeabilidad del tubo. Cierre la pinza cuando termine.


Cuidado y mantenimiento

- 1** Inspeccione el sitio y enjuague el catéter DeltaVen® conforme al protocolo del centro.

- 2** Retire el DeltaVen® cuando ya no se necesite o no esté indicado clínicamente.


Para obtener más información, visite www.smiths-medical.com

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Distribuido por:
Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Fabricado por:
Delta Med s.p.a.
Via G. Rossa, 20
Viadana (Mn), Italia
Tel: +39 0375 785915

MPAUC-0060

**Rx
ONLY**

smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. La marca de diseño de Smiths Medical es una marca comercial de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en otros países. El resto de nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2018 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195486ES-012018