

Catetere a circuito chiuso DeltaVen®


Guida di riferimento rapido

Preparazione


Disinfettare il sito di inserimento secondo la politica della struttura, utilizzando l'agente antisettico per la cute preferito.

Inserimento


1 Verificare che i collegamenti siano fissati in maniera corretta e che la clamp sia in posizione "aperta".

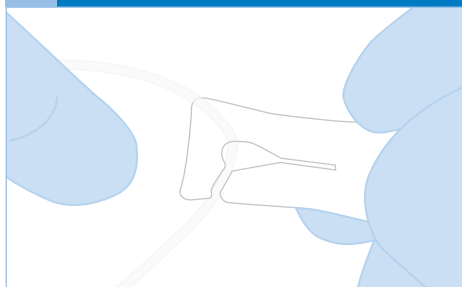


2 Rimuovere la guaina ruotandola, afferrando contemporaneamente la sezione con le alette colorate. Ispezionare il catetere.

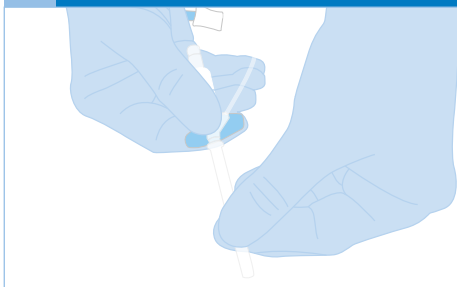


3 Eseguire la venipuntura utilizzando un angolo di inserimento corretto. Verificare l'eventuale presenza di flash nell'estremità distale del catetere.

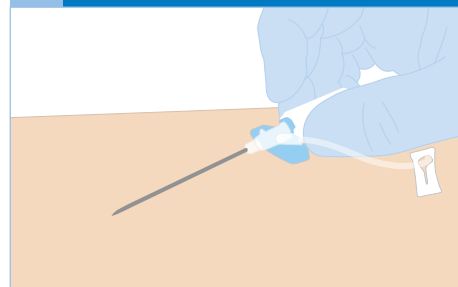


4 **Spingere delicatamente.** Abbassare il catetere DeltaVen® in una posizione quasi parallela alla cute. Far avanzare di qualche millimetro l'intero catetere per garantire che il tubo del catetere sia inserito in vena.

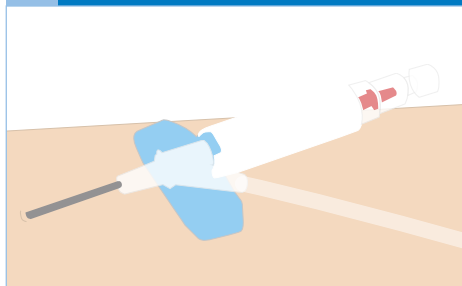


5 **Tirare delicatamente.** Tirare indietro l'alloggiamento bianco zigrinato, separando il connettore dal meccanismo di sicurezza.

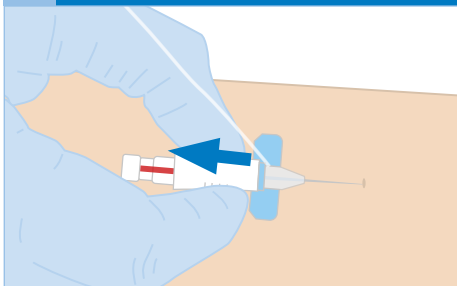


6 **Spingere.** Posizionando il dito dietro la linguetta di estrazione, inserire il catetere in vena mantenendo stabile l'ago.

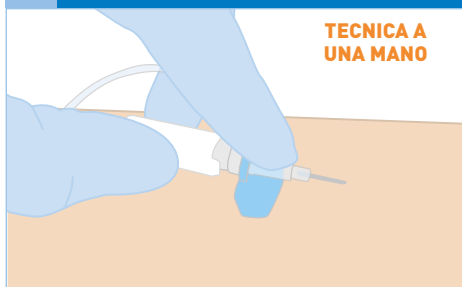

Spingere. Usare la mano non dominante per inserire il catetere in vena, mantenendo stabile l'ago.

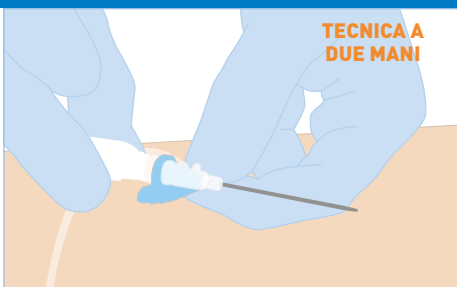






7 **Tirare.** Tirare indietro l'alloggiamento bianco zigrinato, in una posizione quasi parallela alla cute, osservando il flashback secondario nel tubo di prolunga. Tirare fino a quando non si sente un "clic".

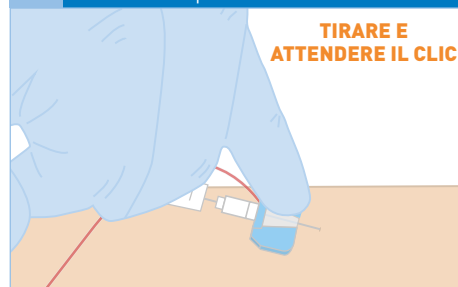



Catetere a circuito chiuso DeltaVen®

Post-inserimento

Preparazione per l'infusione

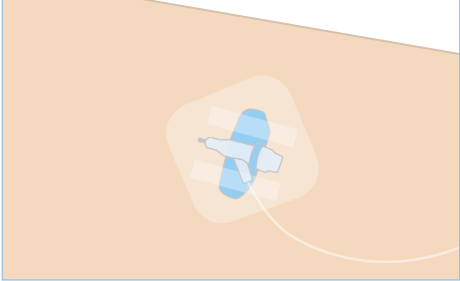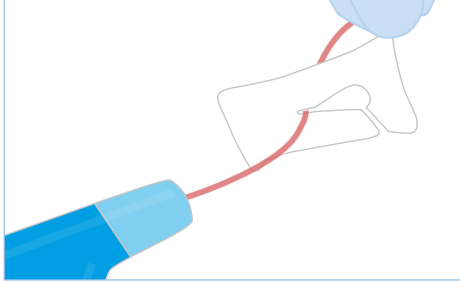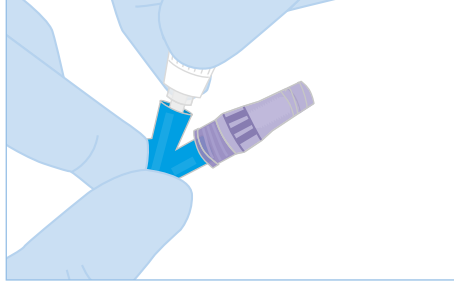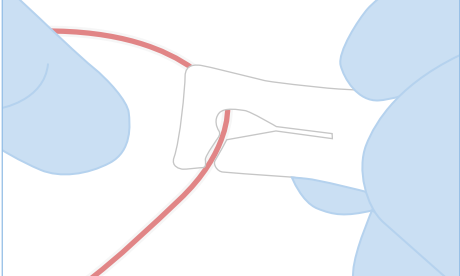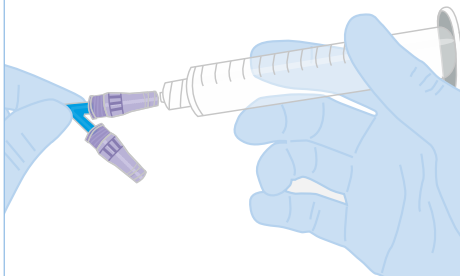1	Stabilizzare e fissare il catetere DeltaVen® secondo il protocollo della struttura.	2	Chiudere la clamp a scorrimento.	3	Rimuovere il tappo ventilato e sostituirlo con un connettore senza ago o un tappo di chiusura.
					
4	Aprire la clamp a scorrimento.	5	Irrorare tutte le vie, utilizzando un irroramento pulsatile per favorire la pervietà della linea. Al termine, chiudere la clamp.		
					

Cura e manutenzione

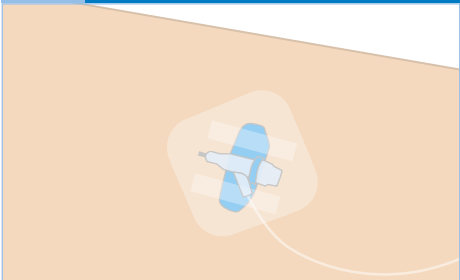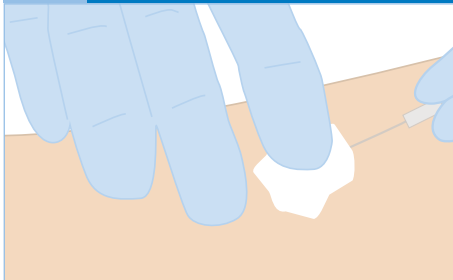1	Eeguire una valutazione del sito e irrorare il catetere DeltaVen® secondo il protocollo della struttura.	2	Rimuovere il catetere DeltaVen® quando non più necessario o quando clinicamente indicato.
			

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.smiths-medical.com

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Distribuito da:
Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200
www.smiths-medical.com

Prodotto da:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tel : +39 0375 785915

MPAUC-0060

Rx
ONLY

smiths medical

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. CADD e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo © indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195486ITCH-012018