

## Cateter de sistema fechado DeltaVen®


Guia de consulta rápida

### Preparação


Limpe o local de inserção de acordo com a política da sua instituição utilizando o agente antisséptico cutâneo recomendado

### Inserção


**1** Verifique para garantir que as ligações estão corretamente estabelecidas e que o clamp está na posição "aberto".

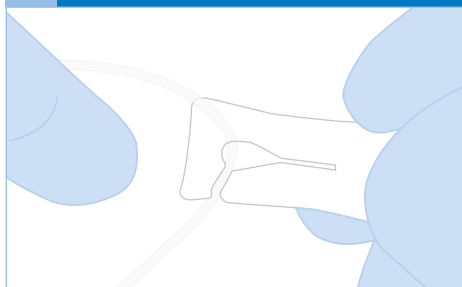


**2** Retire a bainha com um movimento de torção, enquanto segura na secção com aba colorida. Inspeccione o catéter.

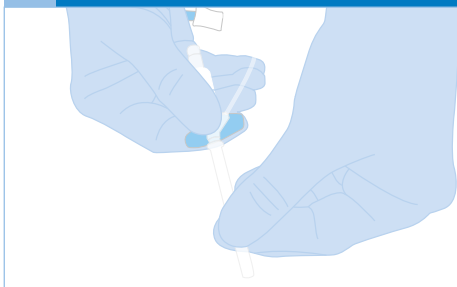


**3** Efetue a punção venosa utilizando um ângulo de inserção adequado. Verifique o fluxo rápido na extremidade distal do cateter.

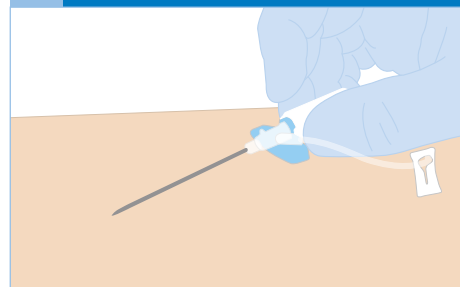


**4** **Empurrar ligeiramente** - Baixe o cateter DeltaVen® até à pele, paralelo a esta. Faça avançar a totalidade do cateter alguns milímetros para garantir que o catéter está na veia.

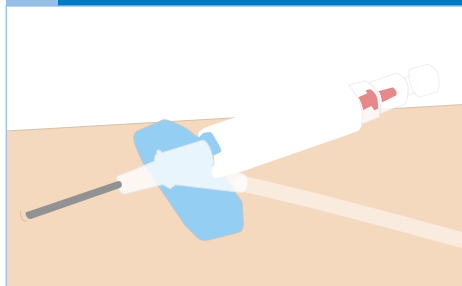


**5** **Puxar ligeiramente** - Puxe para trás segurando a zona branca estriada, separando o conector do mecanismo de segurança.

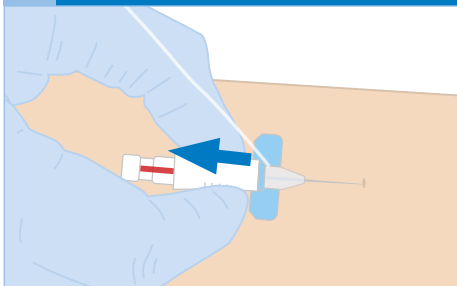


**6** **Empurrar** - Com o dedo por trás da patilha, avançar o catéter na veia mantendo a agulha estável.

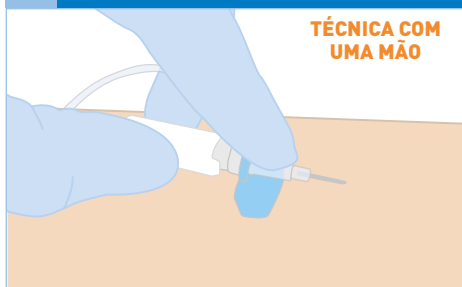

**Empurrar** - Utilize a sua mão não dominante para avançar o catéter na veia, mantendo a agulha estável.

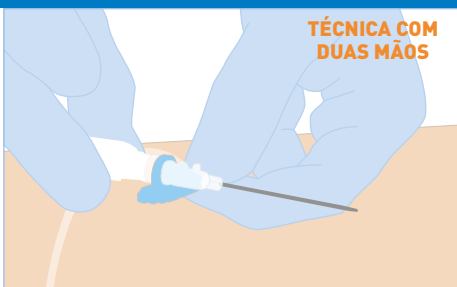

**7** **Empurrar** - Empurre para trás na zona estriada branca, junto à pele e paralela a esta, observando o fluxo de retorno secundário no prolongador. Puxe até ouvir um "clique".


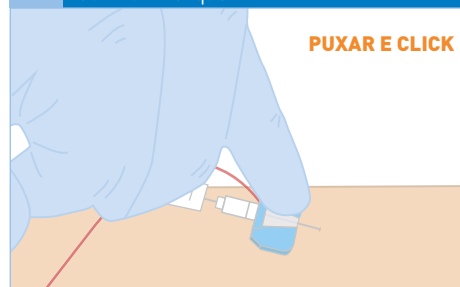

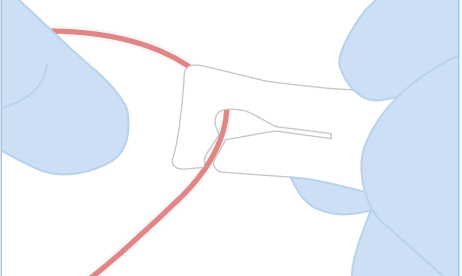
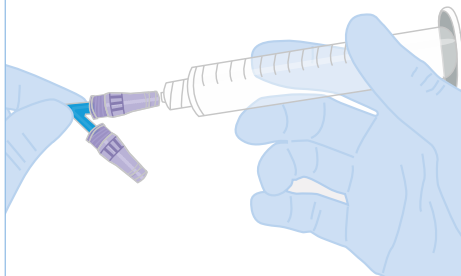


Descarte a agulha com o mecanismo de segurança num recipiente para objetos cortantes adequado, de acordo com as políticas da sua instituição.



# Cateter de sistema fechado DeltaVen®

Pós inserção

## Preparação para a infusão
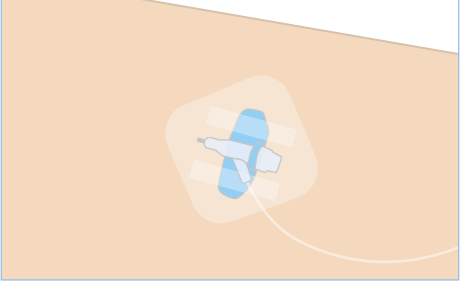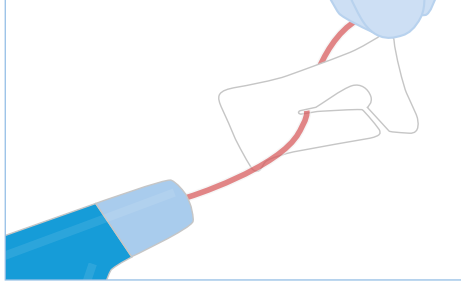
<b>1</b> Estabilize e fixe o cateter DeltaVen® de acordo com o protocolo da sua instituição.	<b>2</b> Feche o clamp deslizante.	<b>3</b> Retire a tampa ventilada, substitua por um conector sem agulha ou tampa.
		
<b>4</b> Abra o clamp deslizante.	<b>5</b> Irrigue todas as portas, utilizando irrigação pulsátil para incentivar a desobstrução da linha. Feche o clampe quando estiver concluído.	
		

## Cuidado e manutenção
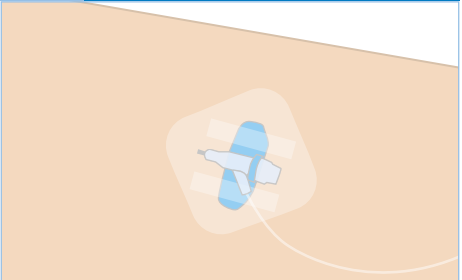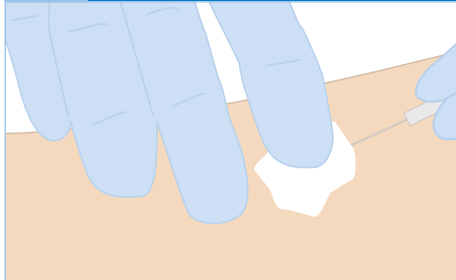
<b>1</b> Efetue uma avaliação do local e irrigue o cateter DeltaVen® de acordo com o protocolo da sua instituição.	<b>2</b> Retire o cateter DeltaVen® quando deixar de ser necessário ou clinicamente indicado.
	

Para mais informações, visite o site [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

**Distribuído por:**  
**Smiths Medical Portugal Lda**  
Av. Eng. Duarte Pacheco,  
Amoreiras, Torre 2 15º A  
1070-102 Lisboa  
Telefone: +351 22 532 30 10  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fabricado por:**  
**Delta Med SpA**  
Via G. Rossa, 20-46019  
Viadana (Mn) - Italy  
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-0060

**Rx**  
**ONLY**

smiths medical

As informações de contacto locais estão disponíveis em: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contra-indicações, advertências e precauções, consulte as Instruções de utilização/Manual do operador. O logotipo da Smiths Medical é uma marca comercial da Smiths Medical. O símbolo ® indica que a marca está registada no Departamento de Marcas e Patentes dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são marcas comerciais ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. O produto referenciado possui marcação CE.  
©2018 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. SS195486PT-012018