

DeltaVen® kateter med slutet system


Snabbguide

Förberedelser


Rengör injektionsområdet enligt klinikens rutiner.

Införande


- 1** Kontrollera att anslutningarna är korrekta och att klämman är i "öppet" läge.

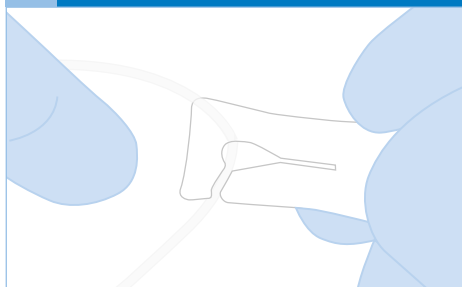


- 2** Avlägsna höljet med en vridande rörelse medan du håller i den färgade vingen. Inspektera katetern.

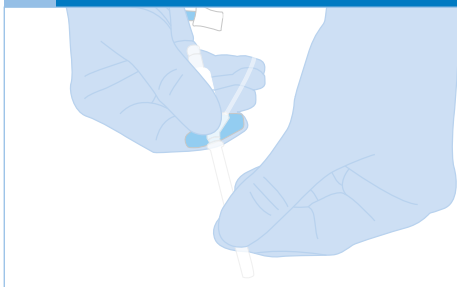


- 3** Utför venpunktionen med lämplig införingsvinkel. Kontrollera att blod syns i kateterens distala ände.

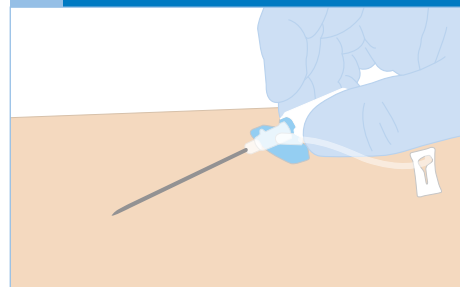


- 4** **Tryck lätt** – sänk DeltaVen®-katetern tills den är nästan parallell med huden. För in hela katetern ett par millimeter för att säkerställa att kateterslangen befinner sig i venen.

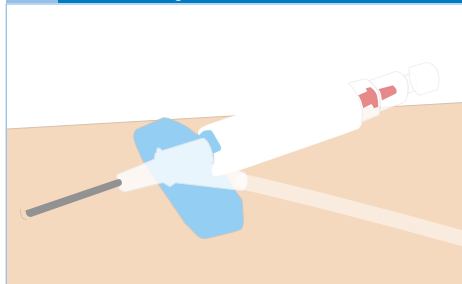

- 5** **Dra lätt** – dra det vita, ribbade höljet bakåt och separera kopplingen från säkerhetsmekanismen.

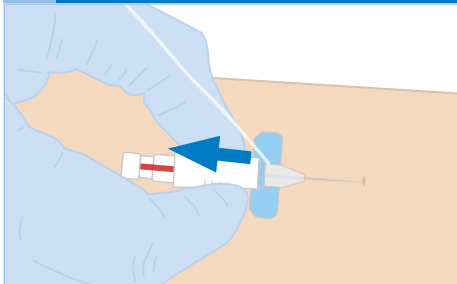


- 6** **Tryck** – placera fingret bakom fliken och för in katetern i venen medan du håller nålen stabil.

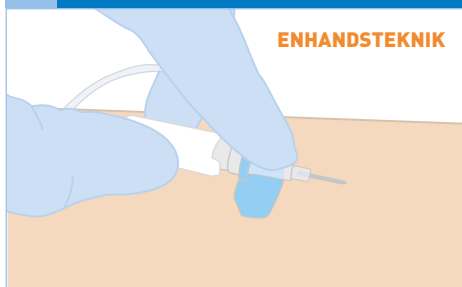


ENHANDSTEKNIK

- Tryck** – använd den assisterande handen för att föra in katetern i venen medan du håller nålen stabil.

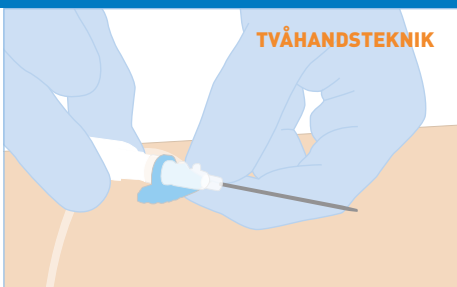

TVÅHANDSTEKNIK

- 7** **Dra** – dra det vita, ribbade höljet bakåt, nästan parallellt med huden, och var uppmärksam på tillbakaflöde av blod i förlängningsslangen. Dra tills du hör ett klickande ljud.

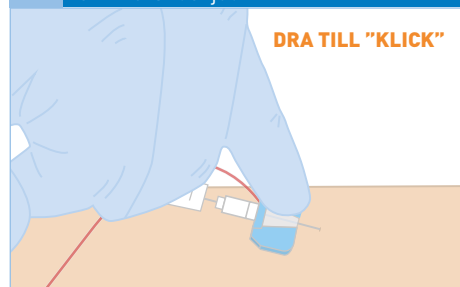


DRA TILL "KLICK"

DeltaVen® kateter med slutet system


Efter införandet

Förberedelser inför infusion


1 Stabilisera och säkra DeltaVen® katetern enligt klinikkens protokoll.

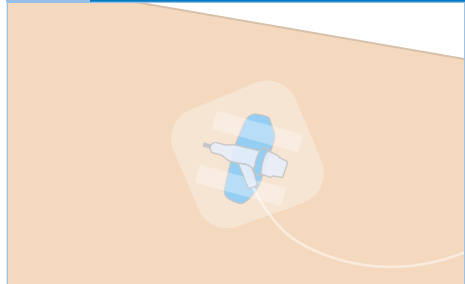


2 Stäng klämman.

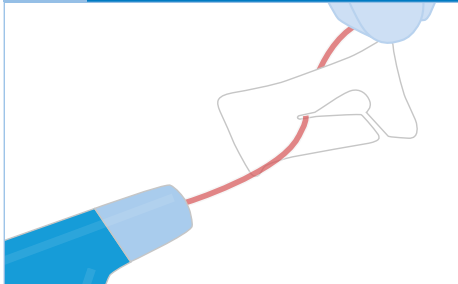


3 Ta bort ventilproppen och ersätt det med en nållös anslutning eller skyddshatt.

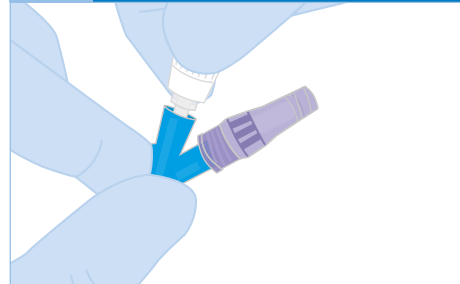

4 Öppna klämman.

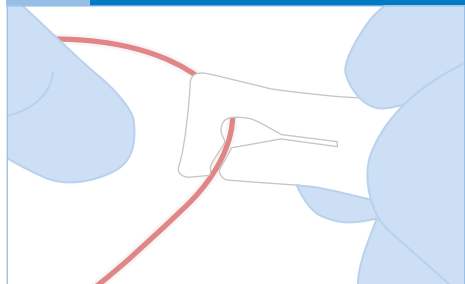


5 Spola alla portar med pulserande spolning för att minska risken för tilltäppning. Stäng klämman när du är klar.

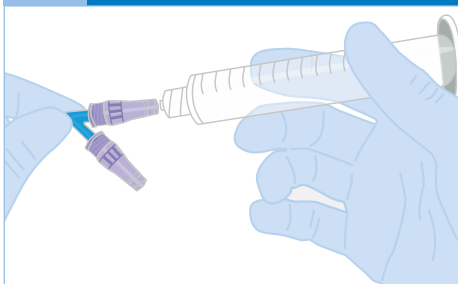


Skötsel och underhåll

1 Gör en bedömning av införingsstället och spola DeltaVen®-katetern enligt klinikkens protokoll

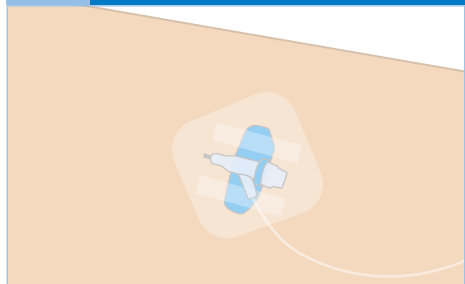

2 Avlägsna DeltaVen®-katetern när den inte längre behövs eller då den saknar klinisk indikation

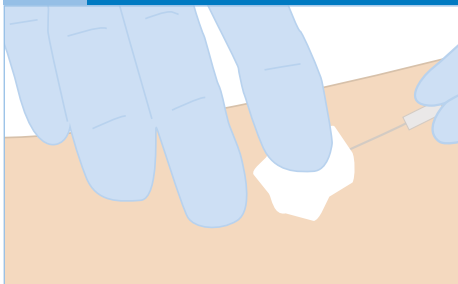

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats: www.smiths-medical.com

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Distribueras av:
Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
164 22 Kista, SVERIGE
Tel: 08-594 772 50
www.smiths-medical.com

Tillverkad av:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tel: +39 0375 785915

MPAUC-0060

Rx
ONLY

smiths medical

Din lokala kontaktinformation finns på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical är en del av den globala teknikverksamheten Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet. Smiths Medical designmärke är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Symbolen © anger att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Angivna produkter är CE-märkta. ©2018 Smiths Medical. Med ensamrätt. SS195486SV-012018