

Système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5 mL

Guide rapide d'utilisation pour prélèvements sanguins



AVANT DE COMMENCER

Sortir le kit de son emballage et vérifier que tous les raccords Luer sont serrés.

Installer le système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5mL sur les supports réutilisables.* Avant de procéder au prélèvement sanguin, vérifier que le système est purgé conformément aux instructions du mode d'emploi et que la pression dans la poche de soluté est bien de 300mmHg, celle-ci étant placée plus haut que le système.

* Le système de montage se compose des câbles, des supports, des clamps et des plaques de capteur LogiCal®. Se reporter au manuel du système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5mL pour plus de références.

1 Avant le prélèvement

- Vérifier que la flèche « OFF » du robinet du réservoir est dirigée vers la seringue du réservoir et que le piston de la seringue du réservoir est en position 0mL.



2 Préparer le système pour procéder aux prélèvements sanguins:

- Tourner la flèche « OFF » du robinet et la diriger en amont, vers la poche de soluté.



- Identifier le site de prélèvement sanguin sans aiguille et nettoyer ce site conformément aux protocoles en vigueur dans l'établissement.
- Tirer lentement le piston de la seringue du réservoir vers le bas en position 5 mL pour aspirer le soluté, entraînant ainsi le sang non dilué vers le site de prélèvement.



- Tourner la flèche « OFF » du robinet pour la diriger en aval, vers le patient.



3 Prélèvement d'échantillons sanguins:

- Raccorder une seringue Luer Lock ou un dispositif de prélèvement au site de prélèvement sanguin sans aiguille



- Prélever délicatement l'échantillon sanguin souhaité.



- Déconnecter la seringue Luer Lock ou le dispositif de prélèvement du site de prélèvement sanguin sans aiguille

ÉTAPES 4 À 5
AU VERSO

4 Reperfuser le sang et purger le système

- Tourner la flèche « OFF » du robinet et la diriger à l'opposé du réservoir.



- Appuyer lentement sur le piston du réservoir pour le ramener en position 0mL afin de reperfuser le sang du patient.



- Activer le dispositif de rinçage jusqu'à ce que le sang soit dégagé de la ligne. Des rinçages brefs sont susceptibles de mieux dégager la ligne. S'assurer que le piston du réservoir se trouve en position 0 mL pendant le rinçage pour permettre un dégagement adéquat.



5 Remettre en position Monitoring

- Après le rinçage, vérifier que le piston du réservoir est en position 0mL.
- Tourner la flèche « OFF » du robinet et la diriger vers le réservoir.



- Nettoyer le site de prélèvement selon le protocole en vigueur au sein de l'hôpital.
- Le système est désormais en position monitoring de la pression.

Ce guide d'utilisation pour prélèvements sanguins reproduit les principales étapes du prélèvement d'un échantillon sanguin à l'aide du système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5 mL.

Avant d'utiliser ce système, l'opérateur doit avoir reçu une formation complète et avoir lu le mode d'emploi qui contient des instructions, avertissements et précautions détaillés en lien avec l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS PRODUITS

Systèmes clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5ml

Référence	Longueur de la ligne	Type de ligne	Emplacement du réservoir	Unité/Boîte
MX96AE181P1	183cm	Simple/Anti-Shunt	Potence	20
MX961E181P1	183cm	Simple	Potence	20
MX961G181P1	183cm	Simple	Bras	20
MX962E181P1	183cm	Double	Potence	20
MX962G181P1	183cm	Double	Bras	20
MX963E181P1	183cm	Triple	Potence	10
MX401G151P1	152cm	Simple/Kit supplémentaire	Bras	20
MX96AE211P1	213cm	Simple/Anti-Shunt	Potence	20
MX961E211P1	213cm	Simple	Potence	20
MX962E211P1	213cm	Double	Potence	20
MX963E211P1	213cm	Triple	Potence	10

Accessories

Référence	Description	Unité/Boîte
MX260-PMCZ	Fixation du support bras du patient	50

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.smiths-medical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical International Ltd.
Hythe, Kent CT21 6JL, UK
Tel: +44 (0)1303 260551

Smiths Medical France
3 rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tel : +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

EC Authorised Representative
Smiths Medical International
TN25 4BF, UK
Tel: +44 (0)1233 722100

MHYTCA-1180



smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions des notices d'utilisation pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Medex, LogiCal et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. MX195041FR-032017